
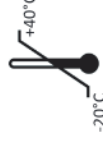


## Partikelfiltrierende Halbmaske (CPA)

Zur Verwendung zum Eigen- und /oder Fremdschutz. Zugelassen nach MPG. Getestet durch das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)

**GEBRAUCHSANWEISUNG:** Der Benutzer der Maske muss zur funktionsgerechten Handhabung unterwiesen werden. CPA-Masken schützen nicht gegen Gase und Dämpfe. Der Sauerstoffgehalt in der Atemluft muss mind. 19,5 Vol.% betragen. Der Atemschutz darf nicht eingesetzt werden, wenn Konzentration, Art und Eigenschaft der Schadstoffe nicht bekannt sind. Die Maske ist sofort zu wechseln wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand ansteigt. Nach dem Ende einer Arbeitsschicht ist die Maske grundsätzlich zu wechseln. Niemals Veränderungen an der Maske vornehmen!

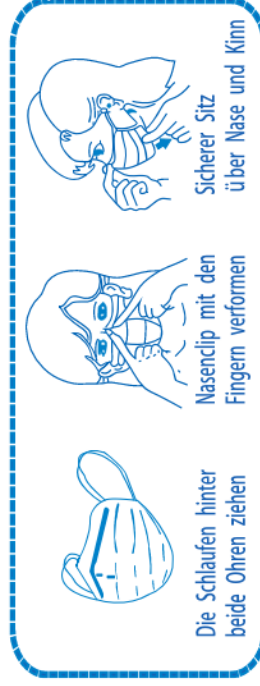

### Importeur:

Hubrich medical GmbH & Co. KG  
Magnolienweg 8  
D-63741 Aschaffenburg  
Tel: +49 (6021) 39 66 66  
www.cpa-maske.de

### Hersteller:

Jiangsu Huanwei Trading co., Ltd  
Add: North of Fudan Road, Sucheng Economic Development Zone, Suqian, Jiangsu, China  
Email: jiangsuhuanwei@gmail.com  
Tel: +86 (0527) 8799 9688

Non-medical respirator